

COLOURED MILLING SCREW

EINGEFÄRBTE FERTIGUNGSSCHRAUBE



Die farbig markierte Schraube wird als Fertigungs- oder Laborschraube für die nt-Preform Abutments benutzt. Für alle Implantatserien und Durchmesser, Ausnahme ist die THO-Serie (Thommen Medical), hier wird ein Vierkant-Schraubendreher benutzt, verwenden Sie den Schraubendreher T6 mit Innen-sechskant.

Für die Befestigung der Fertigungsschraube auf dem unbearbeiteten nt-Preform Abutment benutzen Sie den verlängerten Schraubendreher W 12.WS0.000 und für Thommen Medical den W 11.TH0.MIL.

Für die Befestigung der Fertigungsschraube auf dem bearbeiteten nt-Preform Abutment können die Werkzeuge aus der Spalte „Lab“ benutzt werden.

SERIE	LAB	FRÄSBEARBEITUNG	DREHMOMENT
Alle Serien (außer THO-Serie)	W 11.LN0.G40	W 12.WS0.000	10 Ncm
	W 11.LN2.COF		10 Ncm
THO-Serie	W 11.TH0.G40	W 11.TH0.MIL	10 Ncm
	W 11.TH0.000		10 Ncm